

## **Skötsel**

Step-by-Step kommer att fungera lång tid med ett minimum av service.

Om en Step-by-Step inte skall användas på lång tid bör den förvaras utan batteri p.g.a viss risk för läckage från dåliga batterier.

Step-by-Step får endast rengöras med torr eller lätt fuktad trasa.

## **Step-by-Step får ej dränkas i vatten !**

### **Kundservice, reparationer och returer.**

Ring oss gärna vid frågor eller oklarheter och vi skall gärna försöka lösa dessa via telefon.

Ring gärna och beskriv problem innan apparaten returneras för service. Skickas apparaten till oss, glöm ej att bifoga följande för snabb service :

- Kopia på faktura. ( Vid eventuella garantianspråk)
- Namn på kontaktperson.
- Organisation - Institution - Hemadress.
- Telefonnummer.
- Leverans och fakturaadress.
- Ett kort brev angående orsak till returen.

Om garanti gäller kommer apparaten att repareras eller ersättas utan någon kostnad.

## **Garanti**

Step-by-Step har ett års garanti mot fabrikationsfel.

**Kontakta gärna RehabCenter AB  
för ytterligare information**

**Tel. 08 - 768 25 00**

**Fax. 08 - 792 49 49**

---

## **Användarvägledning**

# **Step-by-Step Communicator med nivåer**

Ett hjälpmedel i serien

# **AbleLink™**

c-o-n-n-e-c-t-a-b-l-e-s

Ett hjälpmedel  
för träning och kommunikation  
med  
talade meddelanden

---


## Step-by-Step med nivåer

Denna bruksanvisning presenterar Step-by-Step med nivåer och ger råd om användning och skötsel för bästa funktion. Läs bruksanvisningen noga och spara den för framtida behov.

Vi är glada för alla synpunkter och förslag till förbättringar av denna och andra bruksanvisningar, produkter eller tjänster.

## Batteri installation och byte.

1. Tag bort bottenplattan (om den är monterad) genom att försiktigt trycka ner snäpplåset, drag sedan bottenplattan bakåt.
2. Tag bort batteriluckan och sätt i ett 9-volt batteri. Anslut batterikontakten med plus (+) och minus (-) polerna rätt vända enligt markering på batteriet.
3. Sätt tillbaka batteriluckan och ev.bottenplatta.

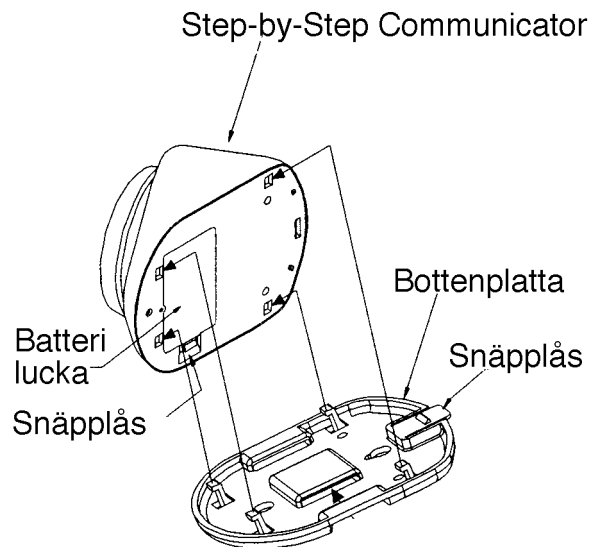

## Användning av Step-by-Step

Step-by-Step kan t.ex användas för att:

- Kontrollera närvaro ("Är Sven här?", "Är Karin här?", "Är ...?").
- Säga fraser i en teaterpjäs.
- Göra en intervju, en fråga i taget.
- Följa instruktioner i en sekvens för att utföra ett arbete.
- Följa ett recept steg för steg.
- Beställa mat ("Jag vill ha en hamburgare", "Jag vill ha kaffe med mjölk").
- Hälsa på folk på olika sätt ("Hej", "God dag", "Hallå", "Tjenare").
- Säga ett ord eller fraser i en sång eller lek.
- Berätta historier.
- Kontaktbok med många olika meddelanden till skola eller föräldrar.

Step-by-Step kan även användas tillsammans med andra produkter från AbleNet.

- Med **All-Turn-It spinner** för att både snurra på pilen och ge talade instruktioner i ett spel.
- Med **Diaprojektor adapter** för att både mata fram nästa bild och samtidigt berätta om bilden. (Fungerar tillsammans med Kodak Carousel diaprojektor).
- Med **batterikabel** för att aktivera en batteridrivna sak och säga något.
- Med en **Powerlink** för att aktivera en 220v el.ansluten apparat och samtidigt säga något. ("Var beredd jag startar vispen.", "Akta er för fläkten.", "Nu startar jag tåget.")

Att ofta ändra / byta meddelanden ger användaren större möjligheter att använda sin Step-by-Step.

När så är möjligt bör talmeddelandet spelas in av någon med för användaren lämplig röst. T.ex barnröst för barn.

## Yttre manöverkontakter

Alla manöverkontakter med 3,5 mm plugg kan användas för att aktivera Step-by-Step. Koppla in manöverkontakten i kontakten märkt ”switch”. Step-by-Step fungerar som vanligt även med extra manöverdon anslutet.

## Montagemöjligheter

Step-by-Step kan med hjälp av den löstagbara bottenplattan monteras på många sätt. Den kan t.ex hängas på väggen med hjälp av nyckelhålen. Det finns även tre hål som passar till fästplattan (liten triangel) som medföljer Slimarmen från RehabCenter AB. Slimarmen och är Universalarmen är båda mkt flexibla och stadiga och kan fästas på ett bord eller rör.

## Felsökning

Om Step-by-Step inte fungerar. Gå först igenom följande punkter. Om felet kvarstår kontaktas RehabCenter AB. Tel 08 - 768 25 00.

### Problem

### Lösning

Step-by-Step återger ej inspelat meddelande

1. Kontrollera att batteriet är i bra kondition och rätt inkopplat.
2. Spela in meddelandet på nytt.
3. Skruva upp volymkontrollen till max.
4. Om en yttre manöverkontakt är ansluten. Kontrollera att den sitter urtaget ” switch ”
5. Koppla ur den och prova Step-by-Step igen.

Bara en del av meddelandet spelades in.

Meddelandet var längre än 75 sekunder. Spela in ett kortare meddelande. Om ”recordknappen” släpps och trycks in igen avbryts inspelningen.

Dålig ljudkvalitet. Byt batteri.

Talet går långsammare. Byt batteri

## Spela in meddelanden.

Step-by-Step med nivåer har 75 sek. inspelningstid. **OBS !** Alla fraser på en nivå måste spelas in på en gång. Det går inte att ändra eller lägga till enstaka fraser på samma nivå senare utan att radera redan inspelat tal.

Då alla fraser måste spelas in rätt på en gång rekommenderar vi att fraserna först antecknas på papper och sedan läses in i Step-by-Step.

1. Sätt på Step-by-Step genom att vrida på volymkontrollen.
2. Tryck på Repeat/Rec knappen två ggr (inom en sek.) och släpp den.
3. Tryck ner och håll kvar den färgade överdelen på Step-by-Step och läs in ett meddelande. Håll den ca 20 cm från dig med högtalaren mot dig.
4. Släpp upp överdelen.
5. Tryck ner och håll kvar överdelen och tala in nästa meddelande.
6. Släpp upp överdelen.
7. Repetera steg 5 och 6 till alla meddelanden på denna nivå är inspelade.
8. Om inga fler inspelningar skall göras på fler nivåer. Tryck på Repeat/Rec knappen **två** ggr för att avsluta inspelningen. Skall fler fraser spelas in på nya nivåer, fortsätt med steg 9.
9. Tryck på Repeat/Rec knappen tre ggr för att fortsätta till nästa nivå. Följ steg 3 - 7 för att spela alla fraser på denna nivå. Följ steg 8 & 9 för att spela in fler fraser på fler nya nivåer.
10. Tryck två ggr på Repeat/Rec knappen för att avsluta inspelningen.

**TIPS! Två tryck på Repeat/Rec inleder eller avslutar en inspelning. Tre tryck tar dig till nästa nivå vid in och avspelning av fraser.**

## Spela upp meddelanden.

1. Tryck ner överdelen på Step-by-Step så spelas ett meddelande upp.
2. Meddelanden spelas upp ett/tryck i samma följd som de spelades in.
3. När det det sista meddelandet på en nivå spelats upp börjar Step-by-Step om med det första meddelandet på samma nivå igen.
4. Tryck tre ggr på Repeat/Rec för att spela upp fraser från nästa nivå.
5. Följ steg 1 - 3 för att spela upp fraser från denna nivå.
6. Om Du snabbt vill flytta fler nivåer. Tryck tre ggr på Repeat/Rec, vänta två sek, tryck tre ggr på Repeat/Rec, vänta två sek, osv.

## Lägga till en ny nivå.

Nya nivåer med nya fraser kan när som helst skapas. Den nya nivån placeras automatiskt efter den senast inspelade nivån. Man kan lägga till önskat antal nivåer inom den totala inspelningstiden 75 sek.

1. Sätt på Step-by-Step genom att vrida på volymkontrollen.
2. Tryck på knapp Repeat/Rec **två** ggr (inom en sekund) och släpp den.
3. Vänta ungefär 2 - 3 sek.
4. Tryck på knapp Repeat/Rec **tre** ggr (inom en sekund) och släpp den.
5. Följ steg 3 - 7 i "Spela in meddelanden".
6. För att spela in ytterligare en nivå med fraser, Tryck på knapp Repeat/Rec **tre** ggr (inom en sekund) och släpp den.
7. Återigen, följ steg 3 - 7 i "Spela in meddelanden".
8. Skall ej ytterligare inspelningar ske. Tryck på knapp Repeat/Rec **två** ggr (inom en sekund) och släpp den.

## Repetera ett meddelande.

"Repeat" funktionen gör det möjligt att låsa Step-by-Step på en fras som sedan kan repeteras ett obegränsat antal ggr.

1. Spela upp alla fraser till den frasen som skall repeteras är uppspelad.
2. Tryck på Repeat/Rec knappen **en** gång.
3. Varje gång Step-by-Step aktiveras kommer den frasen att repeteras.
4. Tryck på Repeat/Rec knappen **en** gång för att avsluta repetitionen och fortsätta spela upp resten av fraserna.

"Repeat" funktionen kan även vara användbar om Du önskar förbereda och lagra fraser för olika användare eller för senare användning.

## Kontakt för anslutning av batterileksaker och apparater.

Till kontakten märkt Toy/Appl. kan en batteridriven leksak anslutas med kabel för batteridriven leksak (kabel kan fås från RehabCenter). Ansluten på detta sätt kommer leksaken att vara aktiverad 1/2 sekund i slutet av meddelandet. För att förlänga aktiveringstiden måste leksaken kopplas via en Switch Latch and Timer till Toy/Appl. kontakten.

## Kontroll av 220v el.utrustningar via styrbox.

En 220v el.apparat måste alltid anslutas via godkänd styrbox. Använd t.ex Powerlink 2 som är en provad och godkänd styrbox. Koppla Power Link 2 till Toy/Appl. kontakten. Ställ in Powerlink 2 på timer eller till/ från funktion.

## Att spela in ljud och aktivera kontakten Toy/Appl.

1. Sätt på Step-by-Step genom att vrida på volymkontrollen.
2. Tryck på knapp Repeat/Rec **två** ggr (inom en sekund) och släpp den.
3. Tryck ner och håll kvar den färgade överdelen på Step-by-Step och tala in en fras. Håll den ca 20 cm från dig med högtalaren mot dig.
4. Efter inläsning av frasen som skall starta en aktivitet och utan att släppa överdelen, tryck in och släpp Repeat/Rec knappen **en** gång. Släpp sedan upp överdelen.
5. Repetera steg 3 och 4 för alla meddelanden du vill kombinera med en aktivitet. Om du vill spela in ett meddelande utan att aktivera kontakten Toy/Appl. låter du helt enkelt bli att trycka på knappen Repeat/Rec.
6. När alla fraser är inspelade tryck på Repeat/Rec knappen **två** gånger för att avsluta inspelningen.

## On/Off

On/Off kontrollen är samtidigt volymkontroll. Step-by-Step bör stängas av helt när den inte används. Det görs genom att kontrollen vrids till det klickar till i off läge. Detta förhindrar dels att Step-by-Step talar p.g.a ett tryck av misstag och dels minskar strömförbrukningen.